



# Einstellen eines Roho-Kissens



## Beschreibung

**Schritt 1:** Drehventil öffnen und Kissen leicht überpumpen. Drehventil schliessen. Bei 4-Kammer/SELECT-Kissen mit ISOFLO™: Grünen Knopf vor dem Aufpumpen eindrücken (Luft gelangt in alle 4 Kammern).

**Schritt 2:** PatientIn auf das Kissen setzen. Sicherstellen, dass PatientIn möglichst weit hinten im Stuhl sitzt. Arm-, Fuss- und Rückenstützen richtig eingestellt sind. PatientIn in gewohnter Ruhestellung sitzt.

**Schritt 3:** Hand unter das Sitzbein (Tuber Ischiadicum) schieben. Drehventil öffnen und Luft entweichen lassen, bis der Handrücken die Sitzfläche berührt. Drehventil schliessen. Verbleibender Abstand zwischen Sitzbein und Sitzfläche: ca. 1,5 – 2,5 cm. Eine regelmässige Nachkontrolle mit der Hand ist empfohlen.

**Schritt 4:** (nur bei 4-Kammer/SELECT-Kissen mit ISOFLO™): PatientIn nach Bedarf positionieren. Bei gewünschter Sitzposition roten Knopf eindrücken. Die Luft wird so in den einzelnen 4 Kammern eingeschlossen, wodurch eine stabile Position erreicht wird. Nachkontrolle mit der Hand für den optimalen Abstand zwischen Sitzbein und Sitzfläche (gem. Schritt 3).

